

Proving it every day

Mölnlycke® fournit des solutions novatrices pour le traitement des plaies, l'amélioration de la sécurité et de l'efficacité chirurgicales ainsi que la prévention des escarres. Ces solutions contribuent à de meilleurs résultats de traitement, elles reposent sur des preuves cliniques et tirées de l'économie de la santé.

Tous nos efforts servent un objectif: permettre aux professionnels de santé de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et nous nous efforçons de le prouver jour après jour.

Sources: 1. Avance Solo Adapt CMM, données internes (réf. 10). 2. Avance Solo Adapt CMM, données internes (réf. 16). 3. Avance Solo Adapt CMM, données internes (réf. 14). 4. Avance Solo Adapt CMM, données internes (réf. 15). 5. Avance Solo Adapt CMM, données internes (réf. 17). 6. Avance Solo Adapt CMM, données internes (réf. 13). 7. Avance Solo Adapt CMM, données internes (réf. 18). 8. Avance Solo Adapt CMM, données internes (réf. 22). 9. Avance Solo Adapt CMM, données internes (réf. 23).

Retrouvez plus d'informations sur
www.avancesolo.com/fr-ch

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Suisse. Tél.: +41 44 744 54 00, info.ch@molnlycke.com.

Les marques de commerce, noms et logos Mölnlycke, Avance et Safetac sont enregistrés dans le monde au nom d'une ou de plusieurs sociétés du groupe de sociétés Mölnlycke Health Care.

© 2021. Mölnlycke Health Care AB.

Tous droits réservés. 2021HQIM002825














Hotline Avance® Solo
+41 44 744 54 01

Pour en savoir plus sur nos systèmes de thérapie
des plaies par pression négative à usage unique
Avance® Solo et Avance® Solo Adapt, consultez le site
www.avancesolo.com/fr-ch

Application Avance® Solo Adapt

Illustration	Mode de fonctionnement	Description
	Auto-test Un auto-test est effectué lorsque les piles sont correctement placées dans la pompe, il confirme que la pompe est prête à fonctionner.	<ol style="list-style-type: none">1. La pompe est activée pendant une courte période.2. Tous les voyants de la pompe clignotent en séquence.3. La pompe émet des signaux sonores: un à moyenne fréquence suivie d'un à haute fréquence.
	Mode thérapie Confirme que la pression négative correcte a été atteinte, que la pompe fonctionne correctement et que la thérapie se poursuit.	<ol style="list-style-type: none">1. Lorsque la pompe est démarrée, le bouton de démarrage vert clignote toutes les secondes pendant 15 minutes.2. En fonctionnement normal, le bouton de démarrage vert clignote deux fois par minute.
	Mode pause Confirme que la pompe et la thérapie ont été mises en pause. Après 60 minutes, la pompe reprend automatiquement la thérapie.	<ol style="list-style-type: none">1. La pompe émet deux courts signaux sonores.2. Tant que la thérapie est interrompue, les signaux sonores sont répétés toutes les 15 minutes.
	Fin de la thérapie La période de thérapie de 14 jours est terminée.	<ol style="list-style-type: none">1. Tous les voyants lumineux clignotent à une intensité élevée.2. La pompe émet trois signaux sonores: un à haute fréquence, un à moyenne fréquence et un à basse fréquence.
	Activation non valide du bouton En cas d'activation non valide du bouton.	La pompe émet de courts signaux sonores.

Alarmes et élimination des défaillances

Illustration	Message d'erreur, causes possibles et description	Élimination des défaillances
	<p>Alarme de fuite La pression négative ne peut pas être établie à cause d'une fuite.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le voyant de fuite clignote une fois par seconde. 2. Si la pression négative ne peut être maintenue: <ul style="list-style-type: none"> • Le voyant de fuite d'air reste actif et clignote une fois par seconde. • La pompe émet un signal sonore de façon répétée. • La pompe interrompt la thérapie. 	<p>Pour corriger une fuite, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur les bords du pansement pour améliorer le contact avec la peau ou appliquez des bandes de fixation supplémentaires sur le pansement, si nécessaire. • Vérifiez que le réservoir est fermement connecté à la pompe, que la tubulure est fermement connectée au réservoir et que la tubulure du pansement est fermement connectée à celle du réservoir.
	<p>Alarme de blocage La pression négative ne peut être établie en raison d'un blocage.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le voyant de blocage clignote une fois par seconde. 2. Si l'état de blocage persiste: <ul style="list-style-type: none"> • Le voyant de blocage reste actif et clignote une fois par seconde. • La pompe émet un signal sonore de façon répétée. • La pompe interrompt la thérapie. 	<p>Pour corriger un blocage, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la tubulure n'est pas pincée ou déconnectée. • S'il est plein, changez le réservoir conformément aux instructions de ce guide.
	<p>Alarme de faible charge des piles</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le voyant lumineux des piles clignote une fois toutes les cinq (5) secondes lorsqu'il reste jusqu'à 24 heures de charge dans les piles. 2. Lorsqu'il reste moins de 4 heures de charge dans les piles: <ul style="list-style-type: none"> • Le voyant lumineux des piles reste actif et clignote une fois par seconde. • La pompe émet un signal sonore de façon répétée. 	<p>Pour corriger l'alarme de faible charge des piles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remplacez les piles en suivant les instructions de ce guide. • Utilisez uniquement les piles au lithium fournies par Mölnlycke Health Care pour ce produit. • Reportez-vous également à la section 8 du manuel pour les professionnels de santé inclus dans l'emballage du produit.
	<p>Alarme de défaillance interne</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Les voyants de fuite, de faible charge des piles et de blocage clignotent simultanément une fois par seconde. 2. La pompe émet un signal sonore de façon répétée. 	<p>La pompe présente une défaillance interne et ne peut pas être démarrée. Contactez votre professionnel de santé ou votre représentant Mölnlycke Health Care.</p>

Avance® Solo Adapt Guide

Système de thérapie des plaies par pression négative



Avance® Solo Adapt


Thérapie par pression négative à usage
unique sans compromis


Mölnlycke®

Thérapie par pression négative à usage unique sans compromis

Avance® Solo Adapt

Le système de thérapie des plaies par pression négative à usage unique Avance® Solo Adapt est indiqué pour les escarres, l'objectif étant de favoriser une guérison plus rapide et de minimiser le risque d'infection. La mobilité du patient n'est que faiblement réduite.

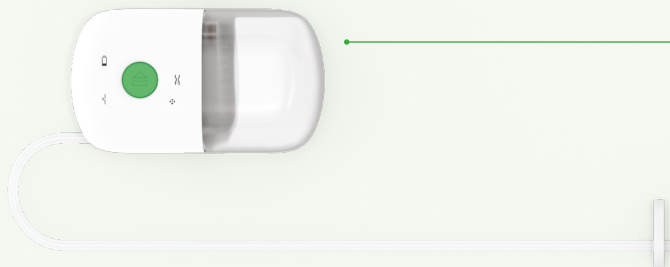

- ✓ Génère pendant 14 jours une pression négative de -125 mmHg^2
- ✓ Les pulsations régulières de la pompe font en sorte que la pression négative soit maintenue pendant que l'air circule, le but étant de transporter l'exsudat excédentaire vers le réservoir^{1,2}


avancesolo.com/fr-ch

Vous trouverez des informations produits complètes, des témoignages, des études de cas, des vidéos d'instructions et bien plus encore sur le site Avance® Solo.



Pression négative régulée et continue

Technologie CFM™ (Controlled Fluid Management; gestion contrôlée de l'exsudat). Elle permet au système Avance® Solo de maintenir une pression négative régulière et continue au niveau de la plaie, et de transporter l'exsudat de la plaie vers le réservoir^{1,6,7}.

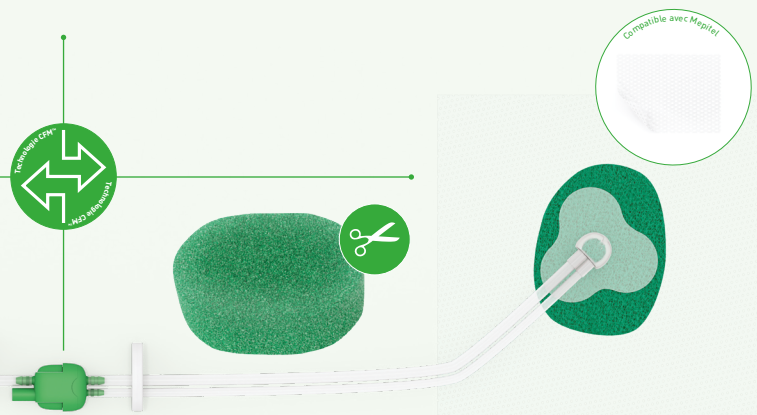

- ✓ Le film Avance® Solo Adapt avec technologie Safetac® est un film souple garantissant une étanchéité efficace pour la thérapie par pression négative^{8,9}
- ✓ Le système Avance® Solo Adapt émet des avertissements visuels et sonores en cas de fuite, de blocage et de piles faibles. Les pannes ou les problèmes de système peuvent être corrigés immédiatement pour que la thérapie puisse se poursuivre^{2,3-5}.

Application d'Avance® Solo Adapt


Pour des instructions complètes, avertissements et précautions, veuillez consulter le manuel utilisateur (manuel pour les professionnels de santé) inclus dans l'emballage du produit.




- 1
- Fixez le réservoir à la base de la pompe en alignant le haut du réservoir avec l'ouverture de la pompe.
 - Faites glisser le réservoir et la pompe ensemble.
 - Fixez la tubulure dans la pince au dos.




- 2
- Insérez deux des piles AA fournies à l'arrière de la pompe en respectant les symboles +/-.
 - Lorsque les piles sont correctement insérées, le système émet deux signaux sonores (un à moyenne fréquence suivi d'un à haute fréquence).
 - Il s'agit d'un auto-test, la pompe est prête à fonctionner.

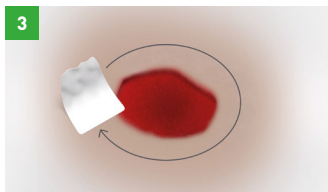

- 3
- Nettoyez la plaie et la peau environnante avant d'appliquer le pansement.
 - Séchez soigneusement la peau péri-lésionnelle.

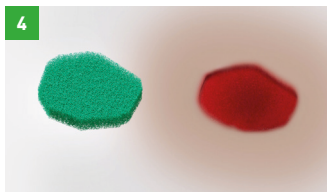

- 4
- La mousse doit être coupée pour s'adapter à la cavité de la plaie sans recouvrir la peau environnante.
 - Veillez à ne pas couper la mousse au-dessus de la zone de la plaie pour éviter que des particules ne pénètrent dans la cavité de la plaie.

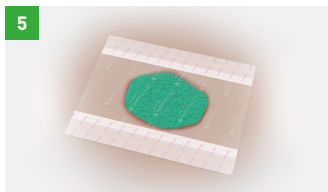


- 5
- Après la pose de la mousse, évaluez la plaie et la zone environnante pour déterminer si le film Avance® Solo Adapt doit être coupé.
 - Faites les ajustements nécessaires en coupant le film (une marge de 4 cm par rapport à la peau péri-lésionnelle est recommandée).
 - Retirez le film de support et appliquez-le sur la plaie. Lissez soigneusement les plis éventuels.



- 6
- Avant de fixer le port de transfert, découpez un trou au centre du film.
 - Le trou doit avoir un diamètre de 1,0 à 2,0 cm maximum.
 - Retirez le film de protection du fond du port de transfert et appliquez-le sur le trou découpé dans le film.
 - Assurez une étanchéité suffisante en lissant les bords du port de transfert.

7

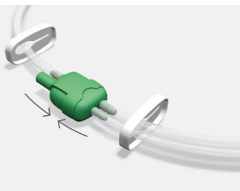


- Connectez les deux raccord verts avant de commencer la thérapie.
- Les pinces sur la tubulure doivent être ouvertes.

8




- Appuyez maintenant sur le bouton vert de démarrage et maintenez-le enfoncé pendant deux (2) secondes.
- Le bouton de démarrage vert clignote et la pression négative est établie.
- La pression négative est atteinte au maximum deux (2) minutes après le démarrage de la pompe.

9

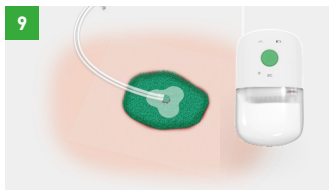

- Lorsqu'une pression négative est établie, le pansement se contracte visiblement.
- Si la pression négative ne peut être établie, la pompe émet un bip et s'arrête.
- Vérifiez le pansement et lissez les plis éventuels au niveau du bord adhésif avant de redémarrer la pompe.

10

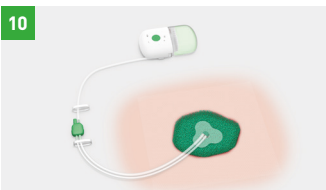


- Si vous avez des difficultés à établir une pression négative, ajustez le film ou appuyez fermement sur les bords pour améliorer le contact avec la peau.
- Si nécessaire, vous pouvez utiliser une quantité supplémentaire de film Avance® Solo Adapt. Le cas échéant, vous devrez recommencer à zéro.

Remplacement du réservoir




- Mettez la pompe en pause en appuyant sur le bouton de démarrage vert pendant deux (2) secondes.
- La pompe émet deux bips pour confirmer le mode pause.

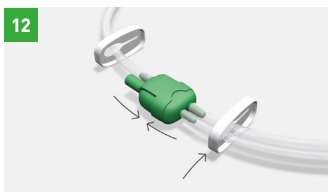

- Poussez les pinces jusqu'à proximité des raccords verts.
- Appuyez sur les deux pinces au niveau des tubulures.
- Déconnectez les deux raccords verts.



- Au dos de la pompe, détachez la tubulure du support.
- Appuyez fermement sur les brides en plastiques latérales du réservoir.
- Tirez dessus en les faisant légèrement osciller pour détacher le réservoir.
- Raccordez le nouveau réservoir.
- Le réservoir doit être correctement fixé pour être bien étanche.

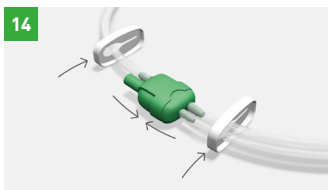

- Connectez à nouveau les deux raccords verts.
- Desserrez la pince de la tubulure du pansement.
- Démarrez à nouveau la pompe en appuyant sur le bouton de démarrage vert, puis en le relâchant au bout de deux (2) secondes.
- Assurez-vous que de la pression négative est bien établie. Le pansement se contracte et est rigide au toucher.

Remarque: Si vous souhaitez faire participer votre patient à la thérapie lors du remplacement du réservoir, n'oubliez pas de lui faire une démonstration de la procédure et vérifiez que le patient dispose de la motricité fine nécessaire à cette tâche.